

MONTAGEANLEITUNG

Bettaufrichter Comfort Lift



Bedding Group

Diese Anleitung beschreibt die Montage des Betaufrichterbügels auf einem Comfort Lift.

Der Betaufrichter kann nicht mit einem Kopfteil kombiniert werden.

Mit Hilfe dieses Bügels kann der Betaufrichter sowohl links hinten als auch rechts hinten auf dem Comfort Lift montiert werden, wobei der Handgriff mittig über dem Bett hängt.

Bringen Sie die Hebeposition auf den niedrigsten Stand, um sicher arbeiten zu können.


Bringen Sie den verstellbaren Rückenteil in den höchsten Stand, damit der oberste Rahmen an der Kopfseite erreichbar ist.

Entfernen Sie auf beiden Seiten den Bolzen und die Buchse aus dem Rahmen (siehe nachstehendes Foto).



Schieben Sie den Bügel möglichst tief in den Rahmen.

Sorgen Sie dafür, dass die Aussparung (siehe nachstehendes Foto) im Bügel links und rechts in Höhe der Bolzenposition auf beiden Seiten des Rahmens kommt.

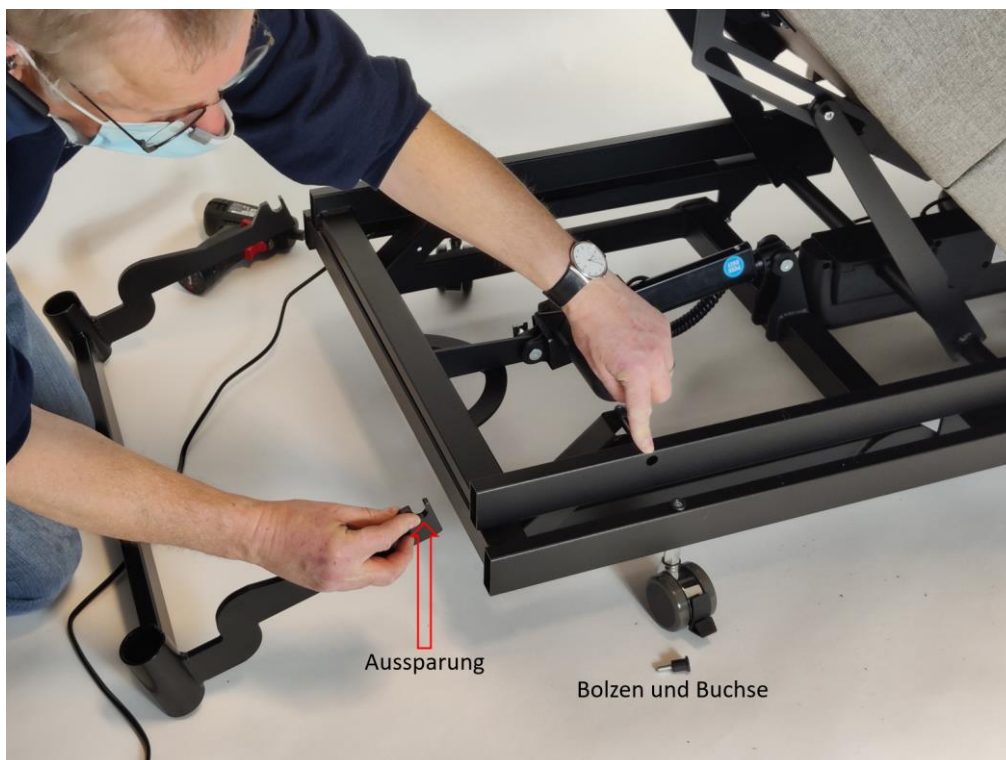

Bringen Sie den Bolzen und die Buchse wieder auf beiden Seiten des Rahmens an.



Sie können den Betaufrichter links oder rechts anbringen.



Befestigen Sie jetzt den Handgriff am Betaufrichter.



Der Betaufrichter befindet sich im obersten Rahmen des Comfort Lift, und somit bewegt er sich mit der Box mit.