

# MONTAGEANLEITUNG

Universalklemme  
Pflegeeinrichtungen  
Comfort Lift



Bedding Group


**Diese Anleitung beschreibt die Montage einer Universalklemme auf einem Comfort Lift.**

Mit Hilfe dieser Klemme können die verschiedenen Pflegeeinrichtungen auf einem Comfort Lift befestigt werden.

Stellen Sie den Lift und die verstellbaren Boxspringteile des Comfort Lift auf maximale Höhe ein, damit der Oberrahmen aus Metall frei zugänglich ist.



Entfernen Sie die quadratische Metallplatte vom Edelstahl-Befestigungsbügel.

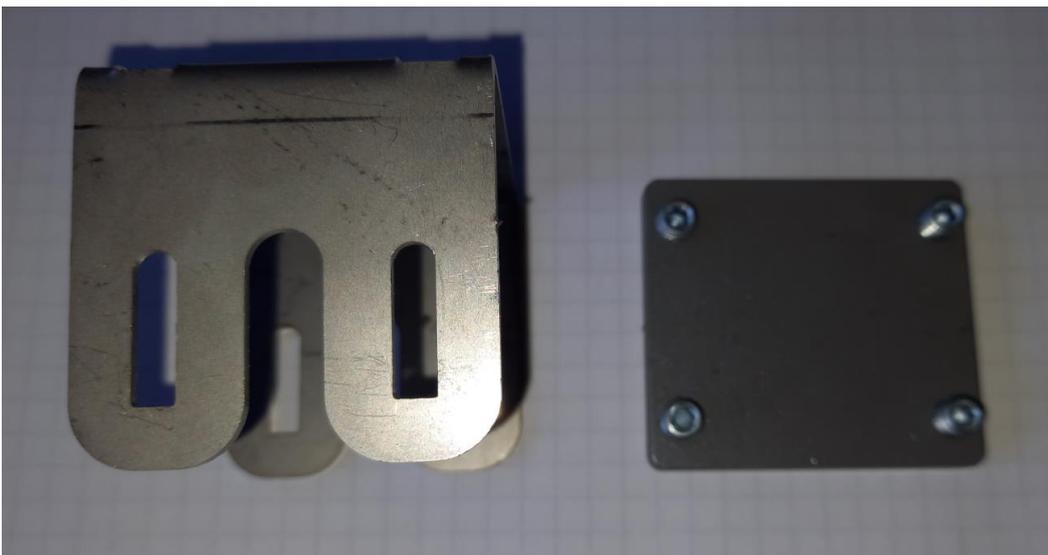

Bestimmen Sie die Stelle, an der die Pflegeeinrichtung montiert werden muss.

Schieben Sie den Edelstahl-Befestigungsbügel entlang der Innenseite über den Oberteil des Längsträgers des Metallrahmen.



Am „Halterungsarm“ der zu montierenden Pflegeeinrichtung befinden sich 2 Seitenplatten (Hakenanker) zur Befestigung an der Universalklemme.

Lösen Sie diese Seitenplatten mittels der 2 Schrauben und Muttern und haken Sie diese (mit Hilfe einer der Schrauben) in die Rillen des Edelstahl-Befestigungsbügels ein.




Drücken Sie den Edelstahl-Befestigungsbügel zu, sodass die Seitenplatten in den Furchen des Befestigungsbügel einhaken.




Entfernen Sie die 4 Innensechskant-Stellschrauben aus der quadratischen Metallplatte. Drücken Sie die zwei Seitenplatten (Hakenanker) gegen den Rahmen, sodass an der anderen Seite ein Platz zwischen dem Rahmen und der Klemme entsteht. Schieben Sie hier die quadratische Metallplatte dazwischen, bis sie schön in der Klemme zentriert ist.



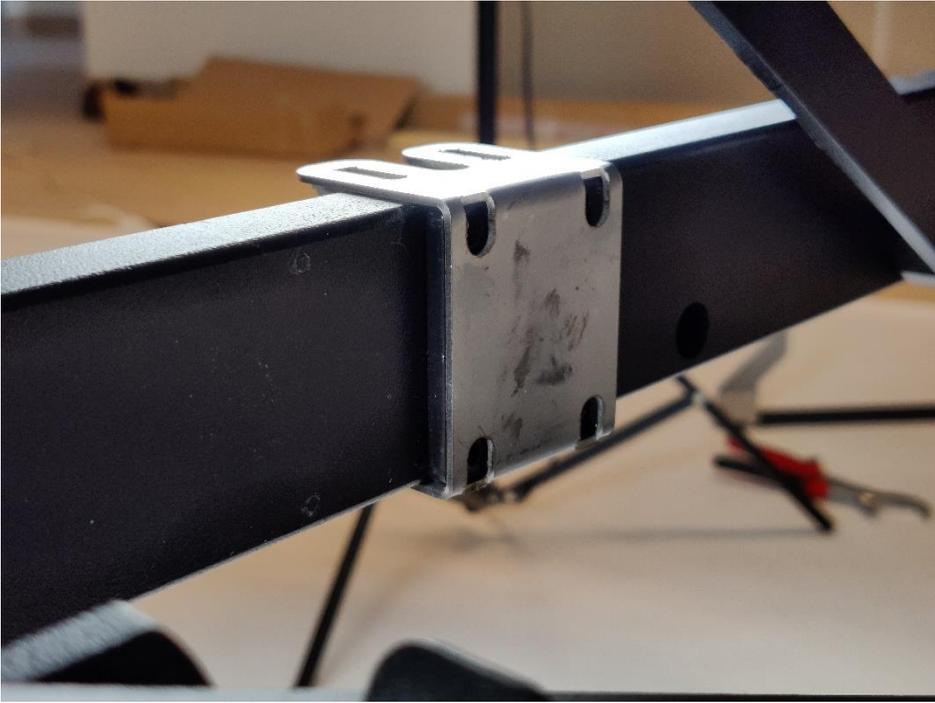

Ziehen Sie die Schrauben an, damit die Klemme auf dem Rahmen befestigt wird.

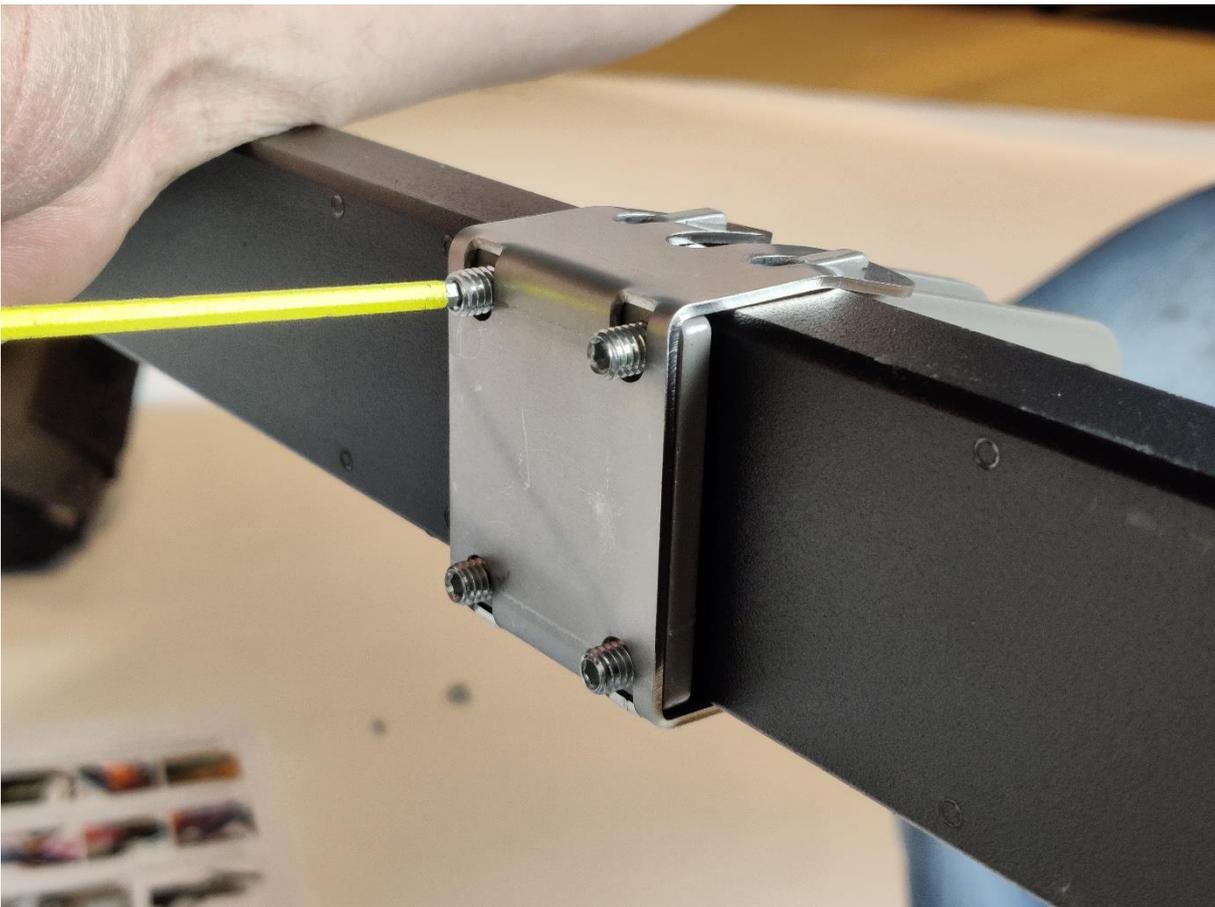

Platzieren Sie den Halterarm zwischen den 2 Seitenplatten und befestigen Sie diese mit den 2 Schrauben und Muttern.



Auf dem Halterarm können jetzt verschiedene Pflegeeinrichtungen angebracht werden.